



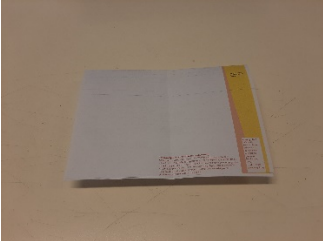






Werkwijze gebruik verzendmateriaal Sanquin Diagnostiek B.V.

Hieronder treft u een korte instructie over de stappen die doorlopen moeten worden bij het verzendklaar maken van materiaal voor Sanquin Diagnostiek B.V t.b.v. de patiëntendiagnostiek.

Het verzendmateriaal kunt u [on-line](#) bestellen (zie bestelinformatie).

	<ul style="list-style-type: none">• Hanteer per transporttemperatuur één (of meerdere) blisters.• Plaats de buizen in de daarvoor bestemde blister, let op de maximale capaciteit is <u>10 buizen</u>.• Met in achtneming van transporttemperatuur en maximale capaciteit van de blister, de buizen van eenzelfde patiënt in dezelfde blister plaatsen.
	<ul style="list-style-type: none">• Alvorens de blister te sluiten dient een absorptievel over de buizen geplaatst te worden.
	<ul style="list-style-type: none">• De blister kan gesloten worden.
	<ul style="list-style-type: none">• Zorg ervoor dat de bijbehorende aanvraagformulieren compleet zijn.• Voeg <u>geen</u> kopieën van de aanvraagformulieren toe, ook niet indien meerdere blisters benodigd zijn voor de patiënt.

	<ul style="list-style-type: none"> • Vouw het aanvraagformulier <u>eenmaal</u> dubbel. • Zorg ervoor dat de patiëntgegevens aan de <u>binnenkant</u> zitten. • Vouw niet meerdere aanvraagformulieren ineen. • Maak geen gebruik van nietjes.
	<ul style="list-style-type: none"> • Selecteer het lekvrije zakje passend bij de transporttemperatuur <ul style="list-style-type: none"> ○ Oranje: KT (kamertemperatuur) ○ Bordeaux: 4°C (koelkast) ○ Blauw: -18°C (droogijs/vriezer)
	<ul style="list-style-type: none"> • Stop de blister en de aanvraagformulieren in het lekvrije zakje. • Let op: aanbevolen wordt om een laatste controle uit te voeren op compleetheid. Na sluiten van het lekvrije zakje is dit niet meer mogelijk!
	<ul style="list-style-type: none"> • Sluit het lekvrije zakje.
	<ul style="list-style-type: none"> • Herhaal bovenstaande stappen wanneer meer materiaal beschikbaar is. • Gebruik hierbij de lekvrije zakjes die corresponderen voor de transporttemperatuur.

Let op: deze werkwijze geldt uitsluitend voor het verzenden van monstermateriaal t.b.v. de patientendiagnostiek.
Indien het een klinische studie betreft, dient u dit apart aan te vragen bij ondergetekenden en zullen wij het gevraagde aantal blisters, absorptiemateriaal en lekvrije zakjes **incl. witte verzendenveloppen** naar u opsturen. De vensters van deze verzendenveloppen worden voorzien van een gekleurd tekstlabel met hierop vermeld de naam van wie dit heeft aangevraagd.