

Mededeling

Datum 17 juni 2009
Onderwerp instructie verzenddoosjes

Verpakkings- en verzendinstructie voor het versturen van diagnostisch materiaal naar Sanquin Diagnostiek in Amsterdam

Geachte inzender,

In het kader van nieuwe veiligheidseisen, zijn wij in 2007 op andere verzendverpakkingen overgegaan die voldoen aan de normen die door TNT-post zijn gesteld (PI 650 (ADR) en de ICAO puncture test). Het inpakken gaat als volgt.

- Plaats de buisjes (max. 5 stuks) in de absorption bag, vouw de klep dicht en plaats deze in de plastic leakproof bag.
- Verwijder de afdekstrip en druk de verzegeling aan.
- Plaats de leakproof bag met inhoud en het aanvraagformulier in het verzenddoosje (aanvraagformulieren zijn nu vaak al vooraf ingeprint met de opdrachtgevergegevens maar moeten verder nog WEL compleet worden ingevuld!).
- Sluit het verzenddoosje en verzegel deze met de bijgeleverde safety sticker met het opschrift "Sanquin D".


In de bijlage ziet u de werking gedemonstreerd. Bij vragen kunt u contact opnemen met het Uitpak- en Distributiecentrum van Sanquin Diagnostiek: 020 – 5123321.

Het verzenddoosje past in de brievenbus en kan als briefpost per TNT verstuurd worden. Niet afgeven op het postkantoor maar rechtstreeks in de brievenbus deponeren!


Hebt u nog oude verzendverpakkingen in u bezit? Wilt u deze dan terugsturen naar:

Stichting Sanquin Bloedvoorziening
Divisie Diagnostiek, Afdeling UDC
Antwoordnummer 16031
1000 SE Amsterdam.

Hoogachtend,

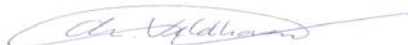

Drs C.H.A. Veldhoven
Hoofd Medische Administratie en Logistiek

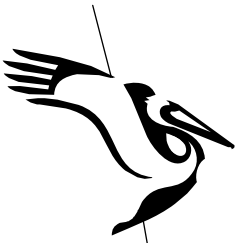

Datum 17 juni 2009
Pagina 2/3

Bijlage

